

Surfaces & sols EYREIN

PRIMACTYL SPRAY 750ML

Ref. PRIMACTYL_SPRAY_750ML



Données techniques

- Aspect : liquide limpide
- pH : non mesurable
- Densité : 0,95 - 0,97

Mode d'emploi

S'utilise pur. Temps de contact : 30 secondes à 30 minutes.
En milieu hospitalier : pulvériser sur la surface à nettoyer et à désinfecter, puis laisser sécher.
Pour le mobilier : pulvériser la surface et essuyer si nécessaire. Le rinçage est inutile

Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres...

Il s'utilise en **milieu hospitalier** : tables d'examen, chariots de transport, matériel d'examen radiologique, salles de soin, chambres des malades... Il permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables... Agréablement parfumé à la menthe. Il ne laisse aucune trace sur le support.

Bactéricide selon la norme EN 1276. Actif sur HIV1, Hépatite B et H1N1.

Données techniques

Conditionnement	750ml
UC	12